

kliniderm[®] Silikonschaum- verband

kliniderm® Silikonschaum- verband

Worum handelt es sich?

kliniderm® Silikonschaumverband ist eine **absorbierende, atraumatische Wundauflage** aus Polyurethanschaum mit einer Silikonbeschichtung. Es handelt sich dabei um eine sterile, selbsthaftende Wundauflage, die aufgrund ihrer Silikonbeschichtung nicht mit der Wunde verklebt und einen sanften Verbandwechsel gewährleistet. Der Schaumverband kann je nach Indikation bis zu 7 Tage auf der Wunde verbleiben. Die Schaumverbände sind **ohne Haftrand und mit Haftrand** erhältlich.

Wie funktioniert es?

Die Schaumstoffschicht nimmt Wundnässe auf und gibt diese über die atmungsaktive Polyurethanfolie als Wasserdampf nach außen ab. Das schützt das Wundbett vor dem Austrocknen und die umliegende Haut vor dem Aufweichen (Mazeration). Die Wundkontaktseite der Auflage ist mit einer weichen Silikonschicht überzogen. Diese ist leicht anhaftend, was das Anlegen der Wundauflage erleichtert. Sie haftet nicht an der Wundoberfläche, schont das empfindliche, neu gebildete Gewebe beim Abnehmen des Verbands und ist sanft zu empfindlicher Haut am Wundrand. Die Schonung des Wundbetts sowie auch der Wundumgebung lässt ein mehrmaliges Abheben der Auflage zu, um mit laufenden Sichtkontrollen den Heilungsverlauf zu beurteilen.

✓ Hoher Tragekomfort

Das Material ist sehr weich und anschmiegsam

✓ Wirksam unter Kompression

Gute Absorption unter Kompressionsverbänden und -strümpfen

✓ Wundreinigung

Durch Einschluss von Bakterien und Zelltrümmern im Schaum

✓ Exsudatmanagement

Nimmt Exsudat auf und leitet es in die superabsorbierenden Fasern, schützt so die umgebende Haut und unterstützt die feuchte Wundheilung

✓ Schutz vor Austrocknung und Mazeration

Eine bakterien- und flüssigkeitsdichte äußere Membran als Schutz vor Keimverschleppung

✓ Kann auf Wundgröße zugeschnitten werden

Die Wundauflage kann, falls notwendig, variabel zugeschnitten werden

✓ Hautfreundlich

Zuverlässiger Halt und sichere Anwendung auf empfindlicher Haut

✓ Weniger Schmerzen

Die weiche Silikonwundkontakt-schicht reduziert Schmerzen beim Verbandwechsel und ermöglicht einfaches Anlegen

✓ Kann bis zu 7 Tage getragen werden

Verringert die Anzahl der erforderlichen Verbandwechsel

Wann sollte das Produkt angewendet werden?

kliniderm® Silikonisierter Schaumverband eignet sich zur Anwendung bei chronischen Wunden, wie Ulcus Cruris, diabetisches Fußsyndrom und Dekubitus, bei postoperativen Wunden, Abschürfungen und anderen traumatischen Wunden sowie bei empfindlicher Umgebungshaut. kliniderm® Schaumverbände sind über den gesamten Heilungsverlauf einsetzbar.


Mit dem Einlagern überschüssiger Wundflüssigkeit in den Verband werden auch Bakterien und Zelltrümmer in den Schaumkern transportiert, dort eingeschlossen und mit jedem Verbandwechsel aus der Wunde entfernt.

Schmerzen sind ein häufiges Merkmal von Wunden und werden möglicherweise nicht auf die Wunde selbst zurückgeführt. Das Entfernen des Verbandes, die Reinigung, die falsche Wahl des Verbandes und das Debridement können jeweils zu wundbedingten Schmerzen führen.

Wenn Sie eine sanfte, angenehme Wundaufgabe für Ihren Patienten benötigen, bieten kliniderm® Silikonschaumverbände die Lösung.

Aufbau

Fünf Schichten in Aktion. Durch einen komplexen Aufbau sorgen kliniderm® Schaumverbände für hohen Patientenkomfort. Der Aufbau ist sowohl für Schaumverbände ohne als auch mit Hafrand gleich:

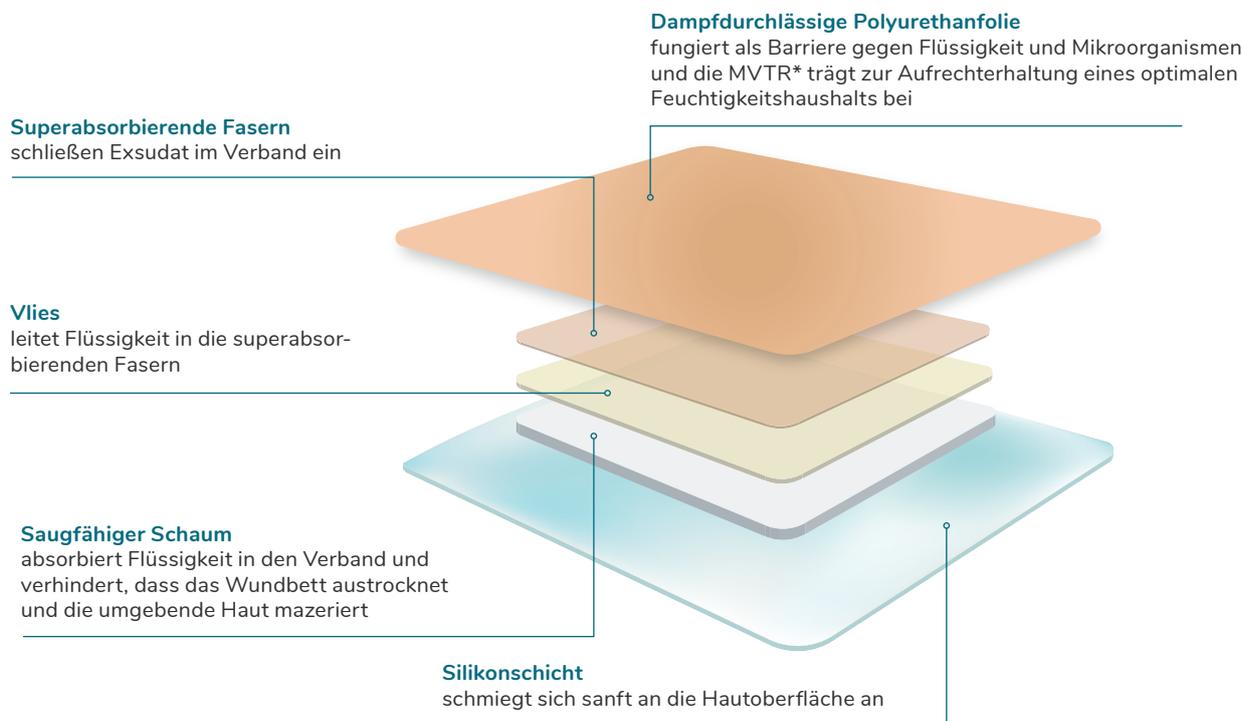

* MVTR bedeutet Wasserdampfdurchlässigkeit - Moisture Vapor Transmission Rate

Bestellinformationen

Bestellen Sie **kliniderm® Silikonschaumverband ohne oder mit Haftrand** für mehr Pflegekomfort und die schnelle Wundheilung Ihrer Patienten.

Bestellen Sie einfach online über unser
Mediq Business Portal per business.mediq.de/de oder per
Telefon 06861 900 76 80
Fax 06861 900 70 18



Produktname	Größe	Stück pro Packung	Packungen pro Karton	PZN	Artikelnummer
kliniderm® Silikonschaumverband	5 x 5 cm	5 x 1	20	10928890	40514823
	10 x 10 cm	5 x 1	20	10928915	40514824
	15 x 15 cm	5 x 1	20	10928938	40514825
	10 x 20 cm	5 x 1	20	12478037	40514826
	20 x 20 cm	5 x 1	20	12478014	40514827

Produktname	Größe	Stück pro Packung	Packungen pro Karton	PZN	Artikelnummer
kliniderm® Silikonschaumverband mit Haftrand	7,5 x 7,5 cm	5 x 1	20	10928944	40514828
	10 x 10 cm	5 x 1	20	10986002	40514829
	12,5 x 12,5 cm	5 x 1	20	12477842	40514830
	15 x 15 cm	5 x 1	20	12477925	40514831
	10 x 20 cm	5 x 1	20	12477954	40514832
	10 x 30 cm	5 x 1	20	12477836	40514833
	15 x 20 cm	5 x 1	20	12477960	40514834



Sie wünschen ein Produktmuster?

Bestellen Sie jetzt **kliniderm® Silikonschaumverband ohne oder mit Haftrand** und überzeugen Sie sich von der Qualität.



Wir erfüllen ein breites Spektrum an Wundversorgungsbedürfnissen und haben **kliniderm® Silikonschaumverband normal und in der Lite Variante**. Letzteres steht für weniger Absorptionsvermögen aber dadurch ist die Lite Variante deutlich flexibler:

Produktname	Größe	Stück pro Packung	Packungen pro Karton	PZN	Artikelnummer
kliniderm® Silikon-schaumverband Lite	6 x 8,5 cm	5 x 1	20	13154420	40514810
	10 x 10 cm	5 x 1	20	13154414	40514811
	15 x 15 cm	5 x 1	20	12477983	40514812
	20 x 50 cm	4 x 1	20	12478008	40514813

Produktname	Größe	Stück pro Packung	Packungen pro Karton	PZN	Artikelnummer
kliniderm® Silikonisierter Schaumverband Lite mit Haftrand	4 x 5 cm	10 x 1	20	10928973	40514814
	5 x 12,5 cm	5 x 1	20	10928996	40514815
	7,5 x 7,5 cm	5 x 1	20	10929004	40514816
	10 x 10 cm	5 x 1	20	12477813	40514817
	15 x 15 cm	5 x 1	20	12477931	40514818



Ihre Vorteile

kliniderm® superabsorbierende Verbände bieten Patienten eine komfortable, schonende Wundheilung. Klinische Studien haben es gezeigt:

98% Patientenkomfort¹

89% einfaches Entfernen¹

100% Vermögen, Exsudat zu regulieren¹

90% einfache Anwendung¹

88% für Anschmiegsamkeit¹

99,99% Anwenderzufriedenheit²

Kontakt

Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns unter:

Telefon 06861 900 76 80

Fax 06861 900 70 18

References: 1. Product Evaluation Report. Data on file. 2. Data on file. KLIN06.





Mediq Deutschland GmbH

In der Bruchwies 10 | 66663 Merzig

Telefon 0800 334 48 00

Fax 0800 334 48 01

business@mediq.com

www.mediq.de



Hersteller

Medeco B.V.

Brandpuntlaan

Zuid 14

2665 NZ Bleiswijk

The Netherlands

